

Ortomobil



Imagem B CONHA

MANUAL DO USUÁRIO

CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO MODELO B CONCHA

rev 12.09.17

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	SIMBOLOGIA.....	1
3.	AVISOS GERAIS.....	2
4.	MODIFICAÇÕES NO PRODUTO.....	2
5.	INSPEÇÕES NO PRODUTO	2
6.	LIMITAÇÃO DE PESO	2
7.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	3
7.1	Estofamento (1).....	3
7.2	Cinto pélvico (2)	3
7.3	Cintas de pernas (3).....	3
7.4	Apoio de braços (4)	3
7.5	Apoio cabeça (5)	4
7.6	Manipulo de travamento (6)	4
8.	MANUTENÇÃO	4
8.1	Verificação mensal:	4
8.2	Verificação anual	5
9.	ARMAZENAGEM E TRANSPORTE	5
10.	PEÇAS DE RESPOSIÇÃO	5
11.	OPCIONAIS ADICIONAIS	6
12.	ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CADEIRA DE RODAS HB	6
13.	DESCARTE	7
14.	CERTIFICADO DE GARANTIA.....	8
14.1	Normas de garantia.....	8
14.2	Termos de garantia	8
15.	Contatos ORTOMOBIL:.....	9
16.	Assistência técnica Autorizada:.....	9

1. INTRODUÇÃO

O presente manual de instruções, destina-se ao modelo de cadeira de Higienização Ortomobil modelo B CONCHA. Todas as informações contidas nesse manual são de extrema importância e merecem a especial atenção do usuário, pois nele estão contidas informações sobre SEGURANÇA, TRANSPORTE, MANUSEIO, OPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO, assim como demais informações destinadas ao referente produto.

O objetivo desse material é orientar o usuário com relação ao funcionamento e também com cuidados necessários para que seu produto tenha uma vida útil alongada e manutenção corretiva mínima. Manusear, operar e manter sua cadeira Ortomobil dentro dos parâmetros recomendados pela fábrica, além de garantir as condições de uso ideais de projeto, previnem situações que possam comprometer a garantia, como negligência e mau uso. Leia o CERTIFICADO DE GARANTIA, no último capítulo deste manual.

2. SIMBOLOGIA

	NÃO LIMPAR A SECO
	NÃO PASSAR FERRO
	NÃO UTILIZAR ALVEJANTE
	SECAR EM BAIXA TEMPERATURA
	ESTE LADO PARA CIMA
	PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O MANUAL
	FRÁGIL
	MANTER AO ABRIGO DA CHUVA
	EMPILHAMENTO MÁXIMO

ATENÇÃO: Consultar documentos acompanhantes

3. AVISOS GERAIS

1. Não use este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem antes ler e entender completamente estas instruções. Se você não estiver apto para entender os avisos, precauções ou instruções, faça contato com um profissional da saúde, revendedores ou suporte técnico antes de tentar usar este equipamento, caso contrário, podem ocorrer acidentes com ferimentos ou danos.
2. Nunca tente usar sua cadeira de higienização além de suas limitações, como descrito neste manual.
3. **IMPORTANTE!** O modelo de cadeira de higienização B CONCHA Ortomobil, é projetado exclusivamente para ambientes internos de sua casa, como quarto e banheiro. Não é um produto destinado ao ambiente externo.

4. MODIFICAÇÕES NO PRODUTO

Para efetuar qualquer alteração ou incremento de acessório em sua cadeira de higienização Ortomobil, contate o profissional responsável pela venda de sua cadeira e se fazendo necessário, o profissional entrará em contato com a fábrica para garantir a qualidade e segurança dos serviços. Portanto, em nenhuma circunstância, por conta própria, modifique, adicione, remova ou desative qualquer parte ou função de sua cadeira de higienização Ortomobil. Qualquer situação mencionada acima, incorre na perda da Garantia, além da possibilidade de ocasionar graves acidentes e danos.

5. INSPEÇÕES NO PRODUTO

Verifique se todas as manipulou e borboletas estão apertadas e ajustadas antes de usar a cadeira. Verifique a presença de corrosão ou qualquer sinal de anomalia no produto;

6. LIMITAÇÃO DE PESO

A cadeira de higienização Ortomobil modelos B CONCHA é dimensionada para uma carga total de 70kg;

Não ultrapasse a capacidade de carga especificada. Se a capacidade de carga for excedida ocorrerá perda da garantia. A Ortomobil não se responsabiliza por danos ou ferimentos resultantes da negligência de observação da capacidade de carga;

7. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

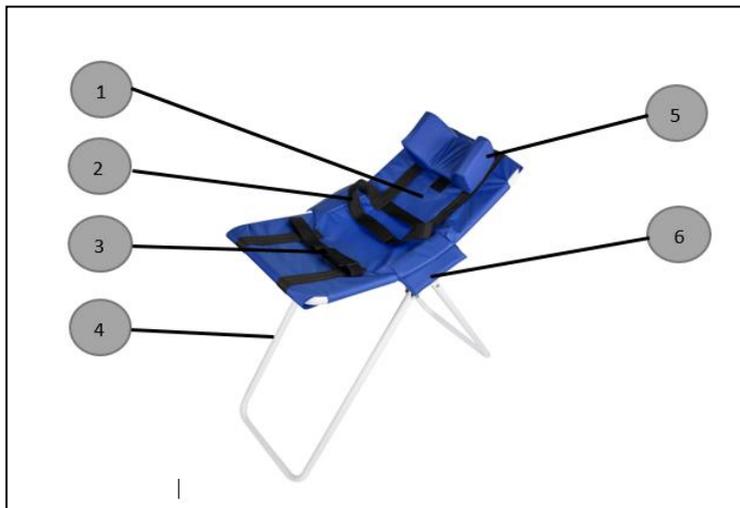


Figura 1: Componentes das cadeiras de higienização B CONCHA.

7.1 Estofamento (1)

Estofamento de nylon impermeável de fácil remoção e higienização.

7.2 Cinto pélvico (2)

Cinto pélvico de nylon com velcro resistente para fácil manuseio.

7.3 Cintas de pernas (3)

Cintas de pernas com velcro que facilitam o manuseio e garantem a segurança.

7.4 Apoio de braços (4)

Estrutura tubular de alumínio aeronáutico temperado, com pintura eletrostática de cura quente. Facilmente dobrado com sistema de giro que facilitam o transporte e armazenagem.




Figura 2: Detalhe da cadeira fechada

7.5 Apoio cabeça (5)

Apoio cabeça em espuma macio, anatômico com contenções laterais que dão sustentação durante o uso. Revestimento com material de nylon impermeável.

7.6 Manipulo de travamento (6)

4 manipuladores de fechamento para destravar e efetuar o fechamento da cadeira. Gire-os que a estrutura inferior e superior possam ser fechadas e trave-os para reabrir.

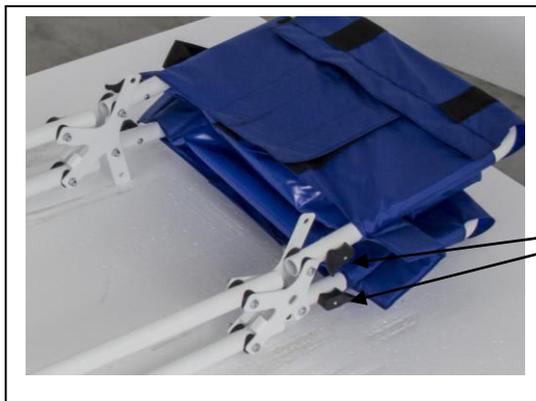

Detalhe dos manipuladores de travamento

Figura 3: Detalhe dos manipuladores de travamento

8. MANUTENÇÃO

A cadeira Ortomobil modelo B CONCHA foi desenvolvida para necessitar de mínima manutenção, proporcionando máxima durabilidade. Entretanto, como todo dispositivo de uso cotidiano, deve seguir procedimentos de rotina para mantê-la em bom estado de uso. Para manter as condições normais de operação por anos, recomenda-se as seguintes verificações de manutenção:

ATENÇÃO: A manutenção incorreta dos itens abaixo pode anular a garantia. Leia com atenção o "CERTIFICADO DE GARANTIA" no final do manual.

8.1 Verificação mensal:

- Verifique o encosto seu aspecto físico e se não existe rasgos ou costura aberta .
- Verificar as costuras e fixações do cinto pélvico e dos cintos de pernas.

8.2 Verificação anual

- Verificar os parafusos do estrutura e conferir os apertos e folgas.
- Verificar os panipulos de travamentos e conferir a sua eficácia de funcionamento.
- Lubrificar levemente os pinos móveis dos manipuladores de travamento usando óleo lubrificante para máquinas. Não usar óleo em excesso, pois pequenas gotas podem manchar e danificar carpetes, móveis, etc. Sempre realizar inspeções gerais quanto ao aperto de todas as porcas e parafusos

9. ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Recomendações de armazenagem e transporte da Cadeira B CONCHA Ortomobil:

- Durante o transporte manusear com cuidado para evitar qualquer dano ao produto.
- Armazenar o equipamento longe de fontes excessivas de calor.
- Condições de transporte e armazenagem: Temperatura: entre -8°C e 50°C
- Manter ao abrigo da chuva
- Empilhamento máximo: 04 cadeiras.

10. PEÇAS DE RESPOSIÇÃO

O fabricante, permanentemente empenhado com a melhoria da qualidade, reserva-se o direito de modificar, sem prévio aviso, as especificações de seus produtos bem como incluir ou excluir itens.

Utilize apenas peças e acessórios fornecidos pela Ortomobil Industria e Comercio LTDA. e compatíveis com o seu modelo de produto. O fabricante não se responsabiliza por qualquer alteração não autorizada, reparos utilizando peças não originais e eventuais danos causados ao produto, ao usuário ou à terceiros em decorrência destas alterações.

As demais peças devem ser substituídas apenas por revendedor ou assistente técnico autorizado.

A Ortomobil Industria e Comércio LTDA mantém à disposição, mediante acordo com suas assistências técnicas autorizadas, os esquemas de circuitos, listas de componentes, descrições de peças, instruções para calibração, aferição e demais informações necessárias ao pessoal técnico qualificado para reparar as partes da Cadeira de rodas.

11. OPCIONAIS ADICIONAIS

Ao adquirir acessórios e opcionais que não tenham sido solicitados no pedido de manufatura do equipamento junto a Ortomobil, é recomendado que o revendedor autorizado ou assistência técnica Ortomobil seja consultado sobre o procedimento correto de instalação. Consulte o “CERTIFICADO DE GARANTIA” antes de realizar qualquer alteração nas cadeiras de rodas Ortomobil.

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CADEIRA DE RODAS HB

Capacidade de carga	70Kg
Estrutura	Em liga de alumínio
Pintura	Eletrostática de cura quente
Estofamento	Fabricado em material 100% nylon
Fechamento	Fechamento em paralelogramo
Temperatura de Transporte	De -8° até 50°
Inclinação Máxima	Sem inclinação
Peso sem a embalagem	9 Kg
Peso total com a embalagem	10 Kg
Tamanho da Embalagem em mm	LAR 150 x PROF 450 x ALT1600
Larguras disponíveis em cm	38 cm
Profundidades disponíveis	32 e 42 cm
Alturas de encosto disponíveis	45 e 65 cm
Cores disponíveis	- Branco Brilhante
Classificação IP da cadeira	IP42

13. DESCARTE

ATENÇÃO: A menos que o componente a ser descartado contenha alguma indicação do contrário, não descarte os componentes com o lixo doméstico, proceda o descarte adequado dos mesmos. Tenha um cuidado especial com pilhas, baterias e componentes eletrônicos, pois estes componentes possuem substâncias que podem ser prejudiciais ao meio ambiente.

ATENÇÃO: Caso este equipamento tenha sido utilizado em ambiente hospitalar, antes do descarte consulte a política de descarte adotada pelo estabelecimento, bem como diretivas legais aplicáveis. Caso esta permita o envio de alguns dos componentes para reciclagem e/ou centros de coleta especializados, não esqueça de higienizar adequadamente os componentes antes de descartá-los.

Ao final da vida útil do equipamento, ou quando qualquer um de seus componentes for substituído, providencie o descarte adequado, conforme indicado abaixo:

- Pilhas e baterias: Procure um centro de reciclagem ou centro de coleta específico para pilhas e baterias, caso não localize, devolva estes componentes no local de compra.
- Tecidos, Almofadas e Sellete: Caso o equipamento tenha sido utilizado em ambiente hospitalar, ao final da vida útil, estes componentes devem ser tratados como lixo hospitalar. Para equipamentos de uso doméstico estes componentes podem ser higienizados e descartados juntamente com o lixo doméstico.
- Componentes Metálicos: Procure um centro de reciclagem ou centro de coleta específico para metais.
- Componentes Eletrônicos: Procure um centro de reciclagem ou centro de coleta específico para componentes eletrônicos, caso não localize, devolva estes componentes no local de compra.
- Caso tenha dificuldades localizar um centro de coleta adequado entre em contato com o revendedor ou com o fabricante.

14. CERTIFICADO DE GARANTIA

14.1 Normas de garantia

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Este termo de garantia é válido nos seus termos, desde que acompanhado de cópia da nota fiscal da compra do produto perfeitamente preenchida, com identificação do proprietário e data de comercialização, pela empresa vendedora.

GARANTIA

Pelo prazo de 3 meses de garantia legal, a contar da data da emissão da nota fiscal e dentro das condições estipuladas nos “TERMOS DE GARANTIA”.

14.2 Termos de garantia

A ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., como fabricante das cadeiras de rodas garante que estas são isentas de defeito de material ou de manufatura, em condições normais de uso.

A obrigação da ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças, dentro do período normal da garantia, cujo exame feito pela empresa fabricante ou autorizada pela mesma, revele satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas será feito pelo fabricante, sendo as despesas de fretes entre a revenda ou assistência técnica, dentro do território nacional, por conta do fabricante, sendo de sua livre escolha o transportador. Os custos de frete entre o cliente e a revenda, assistência técnica ou o próprio fabricante, quando existirem, não são cobertos pela garantia.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:

- A cadeira de rodas Ortomobil que tenha sido sujeita a uso inadequado, negligência ou acidente;
- A cadeira de rodas Ortomobil que tenha sido reparada ou alterada fora do fabricante, de modo que, no julgamento do fabricante, sejam afetados seu desempenho e segurança.
- A serviços de manutenção normal (tais como troca de pneus, baterias, fusíveis).
- A deterioração normal de estofados e itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.
- As baterias com vazamentos, sobrecarga, sulfatação por insuficiência de carga, agressão física na carcaça, terminais ou violadas.

15. Contatos ORTOMOBIL:

e-mail: comercial@ortomobil.com.br – Telefone: 54 3462 6733

16. Assistência técnica Autorizada:

- FISIOCADDEIRAS - GOIANIA:

Contato: Alex

Telefone: (62) 3945 4322

e-mail: alexfisioshop@hotmail.com