

CADEIRA DE BANHO INFANTIL TIPO CONCHA

Português / espanhol



1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho Infantil Tipo Concha.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu produto.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do registro e fabricante legal: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário
CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

País de Origem: China.

Registro da Anvisa: 80795950060



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!

Atendimento ao Consumidor Brasileiro:

0800.604.8008

assistenciatecnica@dellamed.com.br



2. SOBRE O PRODUTO

A cadeira de banho infantil tipo concha é um produto especialmente projetado para proporcionar segurança e conforto durante o banho, para bebês e crianças que possuem dificuldades motoras. Seu design se assemelha a uma concha, o que oferece um suporte ergonômico e acolhedor.

Sua estrutura em alumínio torna o produto ainda mais leve. Pode ser ajustado em 3 tamanhos: P, M e G, facilitando o uso. Sua capacidade de peso é de até 70kg.

3. LISTA DE COMPONENTES

A tabela abaixo ilustra todos os componentes que compõem a sua cadeira de banho infantil Concha:



- | |
|----------------------|
| 1. Apoio de cabeça |
| 2. Cinto A |
| 3. Cinto B |
| 4. Cinto C |
| 5. Tecido acolchoado |

4. MONTAGEM


Tire todos os itens da caixa, certificando-se que não está faltando nenhum item. Após, abra a estrutura do produto, de forma que os dois lados fiquem iguais:



Insira os parafusos por dentro da estrutura, conforme ilustrado abaixo. Repita o processo nos 4 lados da estrutura.



Insira os parafusos por fora da estrutura, conforme ilustrado abaixo. Repita o processo nos 4 lados da estrutura.

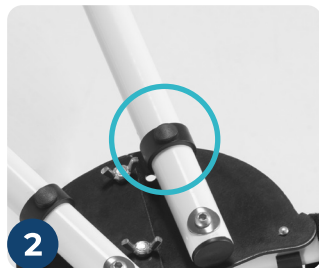

ATENÇÃO

A estrutura possui 3 ajustes em cada lado para que o usuário faça o ajuste conforme necessidade. Ao realizar a montagem da estrutura, certifique-se de colocar todos os parafusos na mesma posição.

Ajuste o cinto da base conforme a necessidade, como indicado abaixo:




5. AJUSTE DE TAMANHO

A cadeira de banho concha Dellamed, possui 3 tamanhos: P, M e G. Eles devem ser ajustados através do pino click, na lateral da cadeira.

Tamanho P: deve ser colocado no último pino click, da parte de baixo e da parte de cima da estrutura, fazendo com que a cadeira fique na menor posição, conforme imagem. O tecido deve ser ajustado, com os velcros para que não fique sobrando.



Tamanho M: deve ser colocado no pino click do meio, na parte de baixo e na parte de cima da estrutura, fazendo com que a cadeira fique na posição do meio, conforme imagem. O tecido deve ser ajustado, com os velcros para que não fique sobrando.

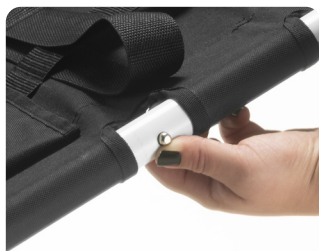

Tamanho G: deve ser colocado no primeiro pino click, da parte de baixo e da parte de cima da estrutura, fazendo com que a cadeira fique na maior posição, conforme imagem. O tecido deve ser ajustado, com os velcros para que não fique na maior posição.



6. DICAS DE USO

- Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por um longo período. Isso prolonga a vida útil do produto, evitando ressecamento e possíveis rachaduras das peças plásticas.
- A cadeira possui aberturas estrategicamente posicionadas para permitir o escoamento rápido da água, evitando a acumulação e facilitando a limpeza.
- Devido ao seu design leve, a cadeira é fácil de transportar, tornando-a ideal para viagens ou uso em diferentes locais.
- O material à prova d'água e o design com aberturas para drenagem facilitam a limpeza e a manutenção da cadeira.

ATENÇÃO

É importante retirar a cadeira da área de banho e de locais úmidos para evitar com que ela permaneça em contato com a umidade por períodos muito longos. Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado, porém sem deixá-la exposta ao sol, até a cadeira secar completamente. Com estes cuidados, sua cadeira de banho terá uma vida útil prolongada.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas do produto	Tamanho P	Tamanho M	Tamanho G
Comprimento Total	79 cm	95 cm	112 cm
Largura Total	52 cm	52 cm	52 cm
Altura Total	95 cm	100 cm	107 cm
Peso líquido	5,5 kg		
Capacidade de peso	70 kg		

8. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes, sendo eles: tecido acolchoado, apoio de cabeça, kit de montagem, cintos de segurança e cinto da base. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
- 09 (nove) meses para estrutura - totalizando 01 (um) ano de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item “b” acima informado.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série/lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

- f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

SILLA DE BAÑO INFANTIL TIPO CONCHA

1. INTRODUCCIÓN

Apreciado Cliente,

Gracias por comprar su silla de baño para niños tipo concha.

Este Manual de Instrucciones contiene las recomendaciones necesarias para el uso adecuado y seguro de su producto.

CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como lema principal la salud de los clientes en 1º lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para poder atender eficientemente a todos los consumidores finales.

DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsable Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Dirección: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Barrio Cinquentenário CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS – Brasil

2. SOBRE EL PRODUCTO

La silla de baño infantil tipo concha es un producto especialmente diseñado para aportar seguridad y comodidad durante el baño a bebés y niños que tienen dificultades motrices. Su diseño se asemeja a una concha, que ofrece un soporte ergonómico y acogedor.

Su estructura de aluminio hace que el producto sea aún más ligero. Se puede ajustar en 3 tallas: S, M y L, facilitando su uso. Su capacidad de peso es de hasta 70 kg

3. LISTA DE COMPONENTES

La siguiente tabla ilustra todos los componentes que componen su silla de baño infantil Concha.



- | |
|-------------------|
| 1. Reposacabezas |
| 2. Cinturón A |
| 3. Cinturón B |
| 4. Cinturón C |
| 5. Tela acolchada |

4. MONTAJE

Saque todos los artículos de la caja, asegurándose de que no falte ningún artículo. Luego abra la estructura del producto para que ambos lados sean iguales:



Inserte los tornillos dentro de la estructura, como se ilustra a continuación. Repita el proceso en los 4 lados de la estructura.



Inserte los tornillos por fuera de la estructura, como se ilustra a continuación. Repita el proceso en los 4 lados de la estructura.



ATENCIÓN

La estructura tiene 3 ajustes en cada lado para que el usuario pueda ajustar según sea necesario. Al ensamblar la estructura, asegúrese de colocar todos los tornillos en la misma posición.


Ajuste el cinturón base según sea necesario, como se muestra a continuación:



5. AJUSTE DE TAMAÑO

La silla de baño infantil tipo concha tiene 3 tamaños: S, M y L. Se deben ajustar mediante el pasador de clic que se encuentra en el lateral de la silla.


Talla S: Se debe colocar en el último pasador de clic, en la parte inferior y superior de la estructura, dejando la silla en la posición más pequeña, como se muestra en la imagen. Se debe ajustar la tela, con velcro para que no quede sobrante.

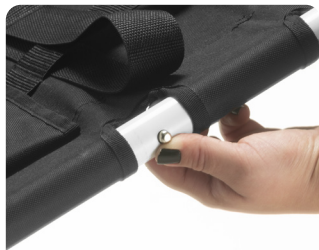

Talla M: Se debe colocar en el pasador de clic del medio, en la parte inferior y superior de la estructura, haciendo que la silla quede en la posición media, como se muestra en la imagen. Se debe ajustar la tela, con velcro para que no quede sobrando.



Talla L: Se debe colocar en el primer pasador de clic, en la parte inferior y superior de la estructura, procurando que la silla quede en la posición más alta, como se muestra en la imagen. Hay que ajustar la tela con velcro para que no quede en la posición más alta.

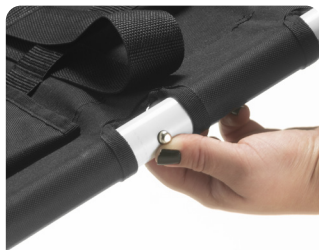

6. CONSEJOS DE USO

- Evite dejar la silla expuesta a la luz solar durante un período prolongado. Esto alarga la vida útil del producto, evitando la desecación y posible agrietamiento de las piezas plásticas.
- La silla tiene aberturas estratégicamente ubicadas para permitir que el agua se escurra rápidamente, evitando la acumulación y facilitando la limpieza.
- Debido a su diseño liviano, la silla es fácil de transportar, lo que la hace ideal para viajar o usarla en diferentes lugares.
- El material impermeable y el diseño con aberturas de drenaje hacen que la silla sea fácil de limpiar y mantener.



ATENCIÓN

Es importante retirar la silla de la zona de baño y lugares húmedos para evitar que permanezca en contacto con la humedad por largos periodos. Adicionalmente, se recomienda dejar la silla en un lugar fresco, pero sin exponerla al sol, hasta que la silla se seque por completo. Con estos cuidados, tu silla de ducha tendrá una vida útil más larga.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medidas del producto	Talla S	Talla M	Talla L
Profundidad Total	79 cm	95 cm	112 cm
Ancho Total	52 cm	52 cm	52 cm
Alto Total	95 cm	100 cm	107 cm
Peso Neto	5,5 kg		
Capacidad de peso	70 kg		



Versão 00 – Data 17/06/2024

